

Simple Protect尿液样本核酸保存液

产品货号: T11539

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

本产品提供了一种简单、安全、有效的保存尿液样本DNA/RNA的方法,可在常温下保持样本中的核酸在一定时间内完整、不降解,为获得下游实验所需要的高质量核酸提供了可靠保障。

本试剂可在4℃下保存RNA长达14天同时保存DNA完整性长达8周,在室温条件下RNA可保存5天同时DNA可保存完整性4周,无需液氮或干冰即可处理、运输、储存和运输样品。或者,也可以将样品置于-20℃或-80℃进行长期存储至少一年以上。

使用建议:

1. 取一个无菌新采样管,加入2ml保存液,后加入4ml尿液样本(尿液与保存液比例为: 2:1)。
2. 将加入尿液的采样管旋紧密封旋盖,完成尿液样本的采集。
3. 剧烈晃动采样管10-15次,使尿液样本与保存液充分混合均匀。
4. 将准备好的样品常温运输即。

注意事项:

1. 本品为灭活型保存液。
2. 注意无菌操作,尽量避免污染。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存,有效期12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com